
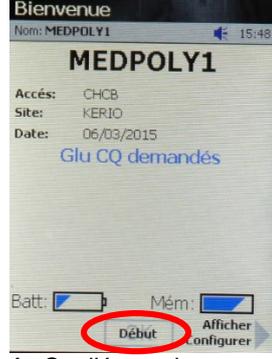
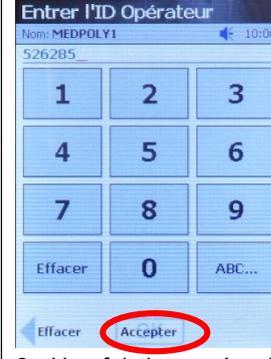
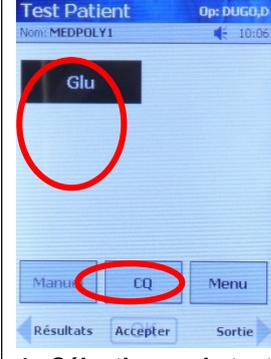
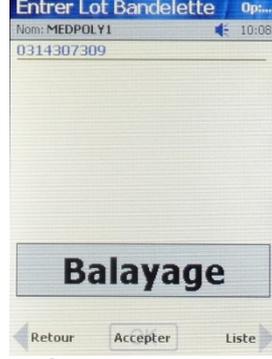
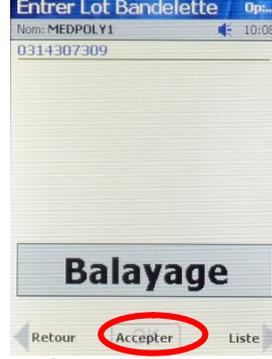
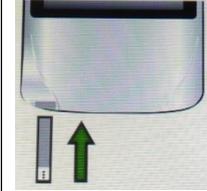


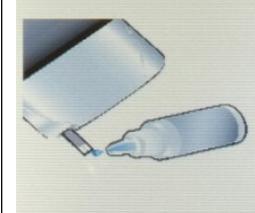

**A CHAQUE CHANGEMENT DE LOT DE BANDELETTE PUIS MENSUELLEMENT**

Un message apparait (figure : 1) avant la date limite de réalisation des CQ pour les passages mensuels. **2 niveaux** de contrôles sont à passer (**niveau 1 et niveau 3**)

 <p><b>1</b> : Sur l'écran de « Bienvenue » appuyer sur <b>Début</b>.</p>	 <p><b>2</b> : Entrer l'<b>identifiant de l'opérateur</b> (n° matricule à 6 chiffres) par scan (appuyer sur balayage) ou en tapant à l'aide du clavier</p>	 <p><b>3</b> : Une fois le numéro de matricule saisi, appuyer sur <b>Accepter</b>. <i>Nota : Si le n° est scanné, l'acceptation est automatique.</i></p>	 <p><b>4</b> : <b>Sélectionner le test</b> Sur l'écran « Test Patient » et appuyer sur <b>CQ</b>. <i>Nota : Le nom abrégé de l'opérateur apparait tout en haut à droite</i></p>
 <p><b>5</b> : Scanner en appuyant sur Balayage, le <b>code-barres n° de lot de la bandelette</b> présent sur le flacon de bandelettes</p>	 <p><b>6</b> : Scanner, en appuyant sur la touche Balayage, le <b>code-barres identifiant du lot de CQ</b> présent sur le flacon de CQ et appuyer sur accepter.</p>	 <p><b>7</b> : Bien <b>homogénéiser les solutions de contrôle</b> (par 10 retournements) et <b>jeter la première goutte</b>. Insérer la <b>bandelette en commençant par le flacon vert</b> (1)</p>	 <p><b>8</b> : Faire entrer en contact la bandelette et une <b>goutte de CQ</b> de niveau 1 (flacon vert) en tenant le lecteur <b>verticalement avec la bandelette vers le bas</b></p>
<p align="center"><b>Attention ! Points de vigilance pour garantir la fiabilité du résultat</b></p> <p><b>9</b> : La bandelette de test doit se remplir complètement et en une seule fois au contact de la goutte de CQ. Ne pas ajouter une seconde goutte de CQ sur la bandelette test.</p>	 <p><b>10</b> : Le résultat est conforme si la valeur est dans la gamme attendue. Un message <b>PASS</b> apparait. Pour accepter le résultat, appuyer sur <b>Accepter</b>. <i>Nota : en cas de résultat hors gamme, recommencer le passage du CQ. Si celui-ci est encore hors gamme, prévenir le biomédical et ne plus utiliser l'appareil.</i></p>	 <p><b>11</b> : Réaliser le test avec le 2ème flacon de QC (flacon rouge). Reprendre à partir de l'étape 4</p>	 <p><b>13</b> : Pour accepter le résultat, appuyer sur <b>Accepter</b>. <i>Après avoir passé avec succès les 2 échantillons CQ, l'appareil est disponible pour l'usage patient</i></p>

**Les solutions de contrôle qualité sont disponibles auprès du magasin général**  
**Attention, les flacons de Contrôles (Niveau 1 et 3) sont stables 3 mois après l'ouverture**  
**Indiquer la date de péremption sur le flacon à l'ouverture**