


Guide Rapide de Résolution des Problèmes

1 Batterie Faible

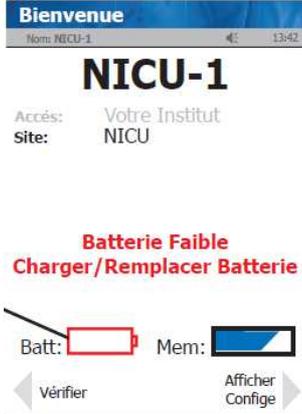


Changer la batterie ou placer l'analyseur dans la station de recharge

2 Bandelette Retirée



Le test a été annulé.

3 Température

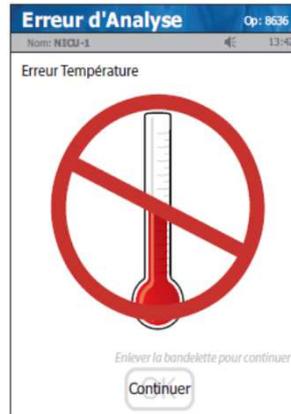

L'analyseur ne fonctionne que dans une fourchette de températures comprises entre 15 et 40°C.

4 Mauvais échantillon




Insérer une nouvelle bandelette et répéter le test.

5 Bandelette Refusée



Se produit après l'insertion d'une bandelette de test ou pendant l'analyse. Insérer une autre bandelette et répéter le test.

6 Erreur de Débit

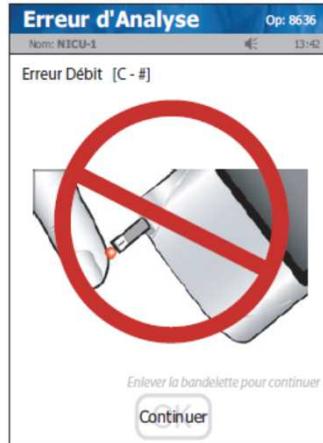


Soit l'échantillon est insuffisant, soit il n'a pas été déposé correctement. Répéter le test avec une nouvelle bandelette

7 Echec du Transfert



L'analyseur n'arrive pas à se connecter à l'ordinateur de transfert. Vérifier la configuration du réseau, l'état du réseau ou demander de l'aide à l'administrateur.

8 Echec du Transfert

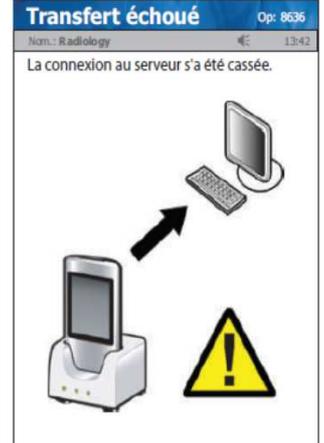

L'analyseur a été déconnecté avant la fin du transfert de données. Reconnecter l'analyseur